



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	
<b>Nombre:</b>	Alcohol desnaturalizado 70%.
<b>Marca:</b>	Reutter.
<b>Materiales:</b>	Corresponde a una solución acuosa de alcohol etílico al 70%.
<b>Color:</b>	Líquido transparente libre de partículas extrañas, incoloro, inflamable, con un olor intenso y fácil de mezclar con el agua.
<b>Presentación:</b>	Caja x 12 envases de 1000 ml.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
<b>Función:</b>	El alcohol al 70% está diseñado para la limpieza de dispositivos médicos tipo II sensibles al calor. Entre los materiales que el fabricante indica limpiar con alcohol están el polipropileno (PP), el policarbonato, el acero inoxidable, el acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) y poliestireno (PS). Producto estable, pH: 5,5-8, punto de inflamación: 14°C, temperatura de autoignición 422°C.
<b>Vigencia:</b>	2 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.
<b>Almacenamiento:</b>	Lugar fresco, bien ventilado y seco a temperatura entre 5° a 30°C. <b>Mantener herméticamente cerrado en su envase.</b> Los productos deben ser almacenados en estanterías separadas del piso.
<b>Uso:</b>	<b>Producto reutilizable</b> , a nivel doméstico, clínico e industrial.

ADVERTENCIAS	
<b>Contacto ocular:</b>	Lave los ojos con agua fría y mantenga los ojos abiertos. Enjuague por 10 minutos.
<b>Contacto dérmico:</b>	Enjuague la piel con abundante agua, cambie su ropa con alcohol y lávela. Recuerde el alcohol es inflamable.
<b>Ingesta accidental:</b>	Acuda a un servicio de urgencia. Mantenga fuera del alcance de los niños.

MEDIDAS EN CASO DE FUEGO	
<b>Agente de extinción</b>	Polvo químico seco.
<b>Equipo de protección especial:</b>	Usar equipo de respiración autónoma.
<b>En caso de derrame:</b>	Aislé y ventilé el área. Aleje toda fuente de ignición.
<b>Recoger alcohol con material absorbente:</b>	Arena.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO		
Código Interno	Tamaño	Color del Envase
DPALCDE8	1000 mL	<b>Azul</b>