

Tipsy®



La bolsa para agua caliente Tipsy® es un producto práctico y confiable diseñado para proporcionar calor y aliviar dolores musculares o molestias causadas por el frío. Su diseño ergonómico, combinado con materiales resistentes y seguros, lo hace ideal tanto para uso doméstico como para fines terapéuticos. Es una solución sencilla y efectiva para mantener el cuerpo cálido y cómodo en cualquier momento.

Código:	B103F103
Marca:	Tipsy
Material:	Caucho resistente al calor. Incluye una funda de tela suave al tacto (opcional) para mayor comodidad y seguridad al usarlo.
Color:	Surtido
Capacidad:	2 L
Presentación:	Pack x 1 unidad
Características:	<ul style="list-style-type: none"> Resistente a altas temperaturas. Diseño ergonómico y antideslizante. A prueba de fugas, con tapón de seguridad roscado. Material flexible para adaptarse al cuerpo.
Recomendaciones:	<ul style="list-style-type: none"> No llenar con agua hirviendo, solo agua caliente (máximo 60°C). Verificar que el tapón esté bien cerrado antes de usar. No sobrellenar (llenar hasta 2/3 de su capacidad). No utilizar en contacto directo con la piel; siempre usar con la funda puesta o una tela intermedia. Revisar periódicamente el estado del caucho para evitar grietas o desgaste.



ADVERTENCIAS

Las bolsas para agua caliente Tipsy® no deben ser manipuladas, abrazadas, ni sometidas a presiones externas o desplazamientos bruscos de cualquier tipo por menores de edad o adultos. Si se utiliza en niños menores de 10 años, usar agua a temperatura inferior a la recomendada (60° C). nunca en contacto directo con el cuerpo, y bajo supervisión directa de un adulto.

La exposición de la piel a una temperatura superior a la normal del cuerpo (37°C), por un periodo prolongado de tiempo, puede provocar lesiones.

INSTRUCCIONES DE USO

Llénelo sólo hasta 2/3 de su capacidad con agua a no más de 60°C.



Antes de cerrar la tapa, saque lentamente todo el aire y vapor acumulado en el interior. Evite que la apertura (gollete) de la bolsa de agua apunte hacia algún lugar de su cuerpo.

Evite filtraciones. Cerciórese de que la tapa de seguridad y el gollete estén en buen estado.

PRUEBAS ANTES DEL PRIMER USO:

Prueba de sellado:



Cierre la bolsa de agua, ejerciendo fuerza en el torque de la tapa (Fuerza en el ajuste de la tapa en el gollete). Con esto usted se asegurará de que el sello no presenta problemas.



Prueba de filtración:

Llene la bolsa con agua de la llave y séllela con su tapa. Haga presión sobre la bolsa y observe atentamente si el líquido se escapa de esta. Sumerja la bolsa llena en un recipiente con agua.

Ejerza presión sobre esta y observe atentamente si existe alguna filtración (Burbujas).

Producto certificado en base a la norma NCh2953 Of. 2005 según modelo ISO/CASCO 7 29 de enero de 2013 Certificado de conformidad No. 7986386a

Otro producto  **Reutter**
Desde 1915

Producto importado y comercializado por REUTTER S.A.

Ficha Técnica V-00 propiedad de Empresas Reutter. Prohibida su reproducción total o parcial, sin consentimiento de la empresa.